



OPTICAL SERVICE NEUHAUS

Churerstrasse 35 · CH-9470 Buchs · Telefon 081 756 36 44 · Telefax 081 756 55 48

www.optical-neuhaus.com

wneuhaus@rheintal.ch

DERMATOSKOP E950/4040



500335 + 500383

Kameraeinstellungen:

- Hauptschalter einstellen.
- **Mode**-Knopf gedrückt halten und gleichzeitig das **Funktionsrad** drehen, bis zur Einstellung **P / S** oder **A**.
- Fokussierung auf unendlich einstellen. **MF** Knopf gedrückt halten und gleichzeitig **Funktionsrad** drehen. (Die Balkenanzeige muss bis ganz nach rechts gefüllt sein)
- **Blitz** ausschalten.
- Mit den Zoom-Einstellknöpfen die gewünschte Vergrößerung resp.den Ausschnitt wählen

Einige technische Daten

	Coolpix 5000	Coolpix E4500	Coolpix E995	Coolpix E995	Coolpix E990	Coolpix E990	
Objektiv f mm	7 - 21	8 - 32	8 - 32	8 - 32	8 - 32	8 - 24	8 - 24
Bildgrösse	2560x1920	2272x1704	2272x1704	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536
Bildqualität	Fein	Fein	Fein	Fein	Fein	Fein	Fein
Zoomposition	Tele/21	Tele/32	WW/8	Tele/32	WW/8	Tele/24	WW/8
Objektfeld mm	16	9	30	9	30	12	30
Vergr. LCD	2.5X	4X	1.2X	4.0X	1.2X	3.0X	1.2X
Vergr.Computer							
bei 50%	24X	35X	9X	35X	9X	30X	11X
bei 100%	48X	70X	18X	70X	18X	60X	22X