



# OPTICAL SERVICE NEUHAUS

Churerstrasse 35 · CH-9470 Buchs · Telefon 081 756 36 44 · Telefax 081 756 55 48

www.optical-neuhaus.com

wneuhaus@rheintal.ch

## Dermtoskop E 950/40



# 500321

### Kameraeinstellungen:

- Hauptschalter einstellen auf Stellung **M Rec.**
- **Blitz** ausschalten.
- Fokussierung auf unendlich einstellen. (**INF**)  
(Fokussierung/Selbstausslöser Knopf gedrückt halten und gleichzeitig das Funktionsrad drehen.)
- Mit den Zoom -Einstellknöpfen die gewünschte Vergrößerung resp.den Ausschnitt wählen

### Einige technische Daten

	Coolpix 5000	Coolpix E995	Coolpix E990	Coolpix E990	Coolpix E950	Coolpix E950	
<b>Objektiv f mm</b>	7 - 21	8 - 32	8 - 32	8 - 24	8 - 24	7 - 21	7 - 21
<b>Bildgrösse</b>	2560x1920	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536	1600x1200	1600x1200
<b>Bildqualität</b>	Fein	Fein	Fein	Fein	Fein	Fein	Fein
<b>Zoomposition</b>	Tele/21	Tele/32	WW/8	Tele/24	WW/8	Tele/21	WW/7
<b>Objektfeld mm</b>	16	9	30	12	30	12	30
<b>Vergr. LCD</b>	2.5X	4X	1.2X	3.0X	1.2X	3.0X	1.2X
<b>Vergr.Computer</b>							
<b>bei 50%</b>	24X	35X	9X	30X	11X	24X	8X
<b>bei 100%</b>	48X	70X	18X	60X	22X	48X	16X